

- Távolítsa el a zárókupakot.
- Csúsztassa a motor és elem egységet ki a házból.
- Elemek elhelyezése: - pólus elsőként (a motorhoz közelebb, ld. a fenti rajzot) (Ha az elem +pólusát helyezük be elsőként, a készülék nem működik megfelelően.)
- Helyezze az elemet a motor és az elem érintkező közé (- pólus a motorhoz közelebb)
- Tegye vissza a motor és elem egységet a házba.
- Győződjön meg róla, hogy a motor megfelelően helyezkedik el a házban, a következők szerint:
 - 1) A motor tengely a ház végének nyílása közepén helyezkedik el.
 - 2) A motor tengely csúcsa együtt áll a ház csúcsával.
- Szorítsa rá részlegesen a zárókupakot.
- Megjegyzés: ha a motor forogni kezd, kövesse az „ALGERBRUSH használata” című fejezet utasításait a motor leállításához.

A tokmány és fúró egység üzembe helyezése:

*** Megjegyzés: A motornak működésben kell lennie mikor a tokmány és fúró egységet installálja, azért hogy megbizonyosodjon a megfelelő elhelyezkedéséről.

- Installáláshoz győződjön meg róla hogy a motor működik, azaz az ALGERBRUSH II "ON" állapotban van.
 - 1) Finoman tolja a tokmány és fúró egységet a motor tengely irányába.
 - 2) A tokmány alapjának a házhoz közel kell lennie, de nem érintheti.
 - 3) Kapcsolja az ALGERBRUSH II-t "OFF" üzemmódba, amíg nem használja.
- Tokmány eltávolítása:
 - 1) Fogja meg az ujjaival a tokmány alját és húzza el a motor tengelytől - vagy
 - 2) Óvatosan feszítse le a motor tengelyt egy megfelelő eszközzel
 - 3) Kapcsolja az ALGERBRUSH II-t "OFF" üzemmódba, amíg nem használja.
- Fúró eltávolítása:
 - 1) Távolítsuk el a tokmány és fúró egységet a motor tengelytől (fenti útmutató szerint)
 - 2) Fogja meg a tokmány alapját az ujjaival, a fúró tengelyét pedig Foley fogóval, és húzza szét
 - 3) Ha új (sterilizált) fúrót akar behelyezni, használja a Foley fogót a fúró befogásához (fogja meg a tengely közepén); ezután tolja a tokmányt a fúró tengely aljáig, amíg kényelmesen lehet.

Tokmány és fúró karbantartása:

*** A tokmány és a fúró egységet a súrlódás tartja össze; ha lazává válik vagy nem illeszkednek egymáson megfelelően, alkalmazza a következőket a megszorításra:

- Ha a tokmány alapja tágga válik a motor tengelyen, csípje össze finoman a tokmány alját egy kisebb kombinált fogóval (Megjegyzés: a tokmány aljának nyílása ne közvetlenül Ön felé essen!)

- Ha a fúró válik lazává a tokmányban, csípje össze a hosszabb részét finoman egy kisebb kombinált fogóval (Megjegyzés: a hosszabb rész nyílása ne közvetlenül Ön felé essen!)

Az ALGERBRUSH II sterilizálása:

*** Ne sterilizálja az egész műszert AUTOCLAVE-ban, mert tönkremehet! ***

- Távolítsa el a tokmány és fúró egységet az ALGERBRUSH II-ről (fenti útmutató szerint)
- A fúró önmagában való lehúzása helyes eljárás, de mivel a fúrók mérete kicsi és nehéz kezelni, ezért jó ha kéznél van több fúró-tokmány egység is.
- Sterilizálja a tokmány és fúró egységet száraz forrólevegő-sterilizálóval vagy Autoclave-val.
- Ha az Autoclave-ot használja, a fúrót el kell távolítani és alaposan meg kell szárítani, különben rozsda képződik rajta (pontosan az a dolog, amit el akart távolítani).
- A házat törölje le alkohollal.